

dr. M. Boudewijns
apr. N. Callewaert
dr. J. Colaert
dr. apr. K. Croes
apr. J. Dekeyster
prof. dr. F. Martens
dr. A.M. Vanden Bulcke
apr. M. Vandermarliere
dr. S. Vanderschueren

Kortrijk, 8 juli 2011

ac loofstraat
Loofstraat 43 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 42 10 | f. 056 63 42 19

**Betreft: Afname van fluoride tubes (grijze stop) voor de bepaling
van glucose in bloed**

ac reepkaai
Reepkaai 4 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 42 20 | f. 056 63 42 29

Geachte collega,


ac vercruysselaan
Burg. Vercruysselaan 5 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 42 30 | f. 056 63 42 39

ac kennedylaan
President Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 42 00 | f. 056 63 42 09

In het kader van onze ISO15189 accreditatie worden wij als klinisch laboratorium verondersteld toe te zien op de correcte staalname en staalbehandeling. In deze optiek wensen wij specifiek uw aandacht te vestigen op de afnamemodaliteiten voor een betrouwbare glucose bepaling. Gezien de beperkte stabiliteit van glucose in bloed (<1 uur) is het aan te raden om naast de traditionele serum tube (gele stop) voor de routine scheikunde ook steeds een aparte fluoride tube (grijze stop) voor de glucose af te nemen. Het gebruik van fluoride tubes garandeert een correct glucose resultaat tot zeker 24 uur na staalname (bewaring bij kamertemperatuur).

Met vriendelijke groet,

Dr. J. Colaert

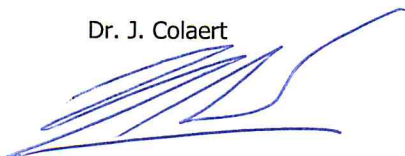

Apr. Biol. N. Callewaert



Prof. Dr. F. Martens

